



# PHAGO'SPORE

Desinfecterend en sporicide reinigingsproduct voor vloeren, werkoppervlakken en medische apparatuur gebruikt voor niet-invasieve procedures.



## Voordelen

- ✓ Gebruiksklaar
- ✓ Bactericide, fungicide, virucide en sporicide (werkt in 10 minuten op *C. difficile* en in 5 minuten op norovirus)
- ✓ Milieuvriendelijk  
(actieve stof : Perazijnzuur)
- ✓ "Food contact" product  
(voldoet aan A.R. van 8 sept. 1999)

## Verpakking

| Verpakking        | Code No. | Aantal/ doos |
|-------------------|----------|--------------|
| 750 ml fles       | 65003    | 6 stuks      |
| 5-liter jerry can | 65007    | 2 stuks      |





# PHAGO'SPORE

## Toepassing

✓ **PHAGO'SPORE** is een desinfecterend detergent voor alle types van oppervlakken, inclusief medische apparatuur die gebruikt wordt voor niet-invasieve procedures.

✓ **PHAGO'SPORE** kan gebruikt worden, mits correct naspoelen, op oppervlakken die in contact komen met voedingsmiddelen.

✓ **PHAGO'SPORE** bevat een actief bestanddeel (perazijnzuur) met een breed microbiologisch spectrum en is tegelijk milieuvriendelijk door zijn biologisch afbreekbaarheid (ontbinding in azijnzuur, zuurstof en water).

✓ **PHAGO'SPORE** kan gebruikt worden uit een verpakking met een sproeikop voor dik schuim om aerosolvorming te vermijden (extra veiligheid voor de gebruikers).

## Samenstelling

✓ Actief desinfecterend bestanddeel:

- Perazijnzuur (CAS No. 79-21-0; 0.03% w/w)
- Waterstof peroxide (CAS No. 7722-84-1; 3,26% w/w)

✓ Parfum

## Organoleptische en physico chemische karakteristieken

✓ Vorm: Vloeistof

✓ Kleur: Kleurloos

✓ Geur: Munt

✓ pH (van puur product) aan 20°C: 2.00

✓ Densiteit aan 20°C: 1.000 - 1.020 g/ml

## Gebruik

✓ **PHAGO'SPORE** is gebruiksklaar.

✓ **PHAGO'SPORE** kan gebruikt worden om de vloeren te desinfecteren indien de gebruiksaanwijzing voor het gebruik van eenmalige vloerreinigingsdoeken correct gevolgd wordt. (1 L per 5 vloerreinigingsdoeken).

✓ Sproei op een wegwerpdoek en/of gebruik deze onmiddellijk op het te desinfecteren oppervlak, spoel niet na (tenzij de oppervlakken na de reiniging in direct contact komen met voedingsstoffen)

✓ Inwerktijd is 5 minuten voor bactericide werking en 15 minuten voor het volledige spectrum.

## Gebruiksaanbevelingen

✓ Gebruik handschoenen en correcte werkkledij.

✓ Vermijd om het product te morsen.

✓ Vervaldatum: 18 maanden na fabricatiedatum.

✓ in contact met de lucht (in een open recipiënt zoals emmer, bak, ...), is het product nog 3 dagen stabiel.

✓ De Veiligheidsfiche is terug te vinden op de website:

[www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

## Hygiënische werking

| Standaard                                                                                                               | Concentratie | Tijd   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|
| <b>BACTERICIDE WERKING</b>                                                                                              |              |        |
| <b>EN 1276</b> vervuilde condities<br>( <i>P. aeruginosa</i> and <i>E. hirae</i> )                                      | 80%          | 1 min  |
| <b>EN 13697</b> vervuilde condities<br>( <i>P. aeruginosa</i> , <i>S. aureus</i> , <i>E. coli</i> and <i>E. hirae</i> ) | 10%          | 5 min  |
| <b>EN 13727</b> vervuilde condities<br>( <i>P. aeruginosa</i> , <i>S. aureus</i> and <i>E. hirae</i> )                  | 8%           | 5 min  |
| <b>FUNGICIDE WERKING</b>                                                                                                |              |        |
| <b>EN 13697</b> vervuilde condities<br>( <i>C. albicans</i> and <i>A. niger</i> )                                       | 100%         | 15 min |
| <b>VIRUCIDE WERKING</b>                                                                                                 |              |        |
| <b>prEN 14476: 2011</b> vervuilde condities (Type 1 poliovirus)                                                         | 100%         | 15 min |
| <b>prEN 14476: 2011</b> vervuilde condities (Type 5 adenovirus)                                                         | 100%         | 5 min  |
| <b>prEN 14476: 2011</b> vervuilde condities (murine norovirus)                                                          | 100%         | 5 min  |
| <b>SPORICIDE WERKING</b>                                                                                                |              |        |
| <b>EN 13704</b> vervuilde condities<br>( <i>C. difficile</i> )                                                          | 100%         | 10 min |
| <b>EN 13704</b> vervuilde condities<br>( <i>B. subtilis</i> )                                                           | 80%          | 15 min |
| <b>EN 13697</b> vervuilde condities<br>( <i>C. difficile</i> , spore-forming type)                                      | 50%          | 15 min |



**CHRISTEYNS**  
MEDICAL HYGIENE

phagogene®

Christeyns France – Division Santé  
31, rue de la Maladrerie - 44120 VERTOU - France  
Tel: +33 (0)2 40 80 27 27 / Fax: +33 (0)2 40 03 09 73  
[www.phagogene.fr](http://www.phagogene.fr)