


Wegwerpbescherminingsset - schort + mouwstukken - BLAUW - 20 stuks

ALGEMEEN

Wegwerpbescherminingsset bestaande uit aparte schort en mouwstukken

- Bescherm de onderliggende kleding tegen ongevaarlijke stoffen
- Bijzonder geschikt in de gezondheidszorg
- De schort bevat gaten voor hoofd en armdoorgang en een geperforeerde lijn aan de achterkant
- De mouwstukken zijn aan elkaar verbonden met een plastic band
- Sterke kwaliteit: 35µ schort en 30µ mouwen
- Kleur: transparant blauw
- rol van 20 stuks schorten + rol van 20 stuks mouwstukken

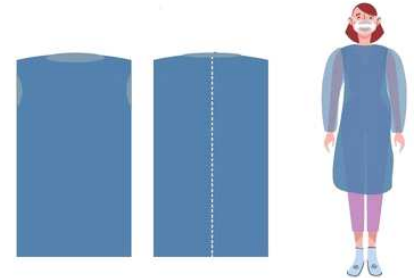

GEBRUIK

1. PROTOCOL GEBRUIK MOUWSTUKKEN

Bij het aantrekken:

- 1) Verwijder het geperforeerde deel in het midden.
- 2) Steek je armen in de 2 mouwstukken.
- 3) Doe de plastic band over je hoofd en laat deze op je bovenrug rusten.

Bij het uittrekken:

- 1) Scheur de plastic band op de rug door aan elke kant te trekken.
- 2) Trek de mouwstukken vanaf de schouder naar de pols terwijl je ze binnenstebuiten draait.

2. PROTOCOL GEBRUIK SCHORT

Bij het aantrekken:

- 1) Verwijder de geperforeerde delen voor het hoofd en armen
- 2) Steek je armen door de openingen
- 2) Steek je hoofd in de opening
- 3) Zorg dat de schouders goed bedekt

Bij het uittrekken:

- 1) Scheur de voorgesneden lijn in de bovenrug door aan elke kant te trekken.
- 2) Verwijder het schort door naar voren en naar beneden te trekken.

Wegwerpbescherminingsset - schort + mouwstukken - BLAUW - 20 stuks**TECHNISCHE SPECIFICATIES**

Afmetingen product (LxHxB) x x cm

LOGISTIEKE GEGEVENS**Product**

Artikelnr	779536
Eenheid	Rol
Bruto gewicht	2390 g
Netto gewicht	2390 g
EAN-code	